

Manual rápido "Sleep Monitor"



Hay que entregarlo a los pacientes

Recordamos al paciente que es fundamental seguir los pasajes explicados más abajo para asegurar precisión y fiabilidad de los resultados

¿Cómo se lleva?

- 1 Desatornille el cierre de seguridad de la conexión para la cánula, extraiga del paquete la cánula nasal, conéctela a la puerta correspondiente y atornille. Inserte el sensor SpO₂ (ilustración 2) en la puerta micro-USB del dispositivo (ilustración 1)



ilustración 1

Ilustración 1 cánula nasal y Sensor SpO₂

A Cánula Nasal

B Sensor SpO₂


ilustración 2



Sensor SpO₂



- 2 Inserte la cánula en la nariz, colocando correctamente el tubo entre la nariz y el mentón y ajuste la cánula nasal como un corbatín para una mayor comodidad.

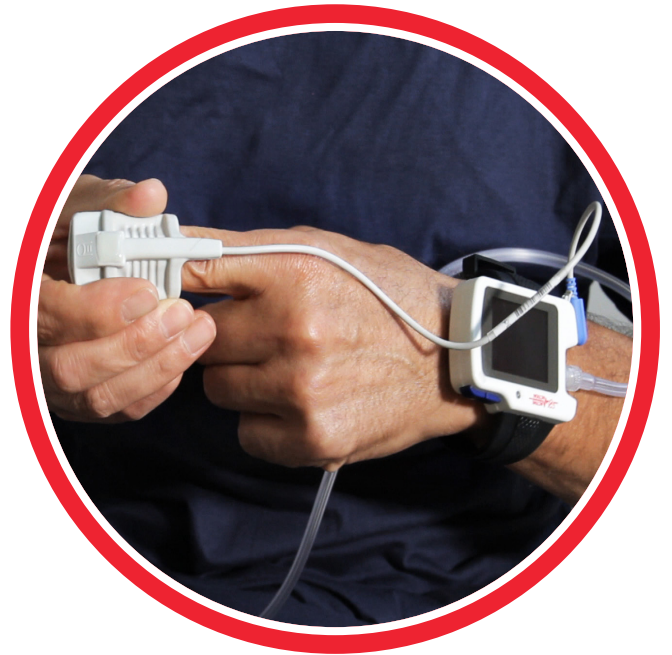

- 2 Coloque el "sleep monitor" en la muñeca e inserte el dedo en el sensor SpO2 como en la ilustración.

¿Cómo se registra?

El instrumento es pre-programado y registra de manera automática. No se requiere ningún tipo de actividad por parte del paciente. Una vez puesto, el dispositivo está listo para el uso. Acuéstese como hace habitualmente, el dispositivo se enciende de forma automática.

Por la mañana, cuando se despierta, quite la cánula nasal, el sensor SpO2 del dedo y el dispositivo de la muñeca. Coloque todo en el correspondiente bolso y vaya a la farmacia para el resultado.