

Guida rapida all'utilizzo dell'Holter ECG Faros

1. Collegare il dispositivo al computer mediante il cavo USB fornito in dotazione.
2. Controllare che la batteria dello strumento sia carica. Il LED blu sul sensore dovrebbe emettere una luce fissa. Se il LED blu lampeggia, il registratore si sta ricaricando. Far ricaricare completamente la batteria prima dell'uso.
3. Il programma Holter Manager dovrebbe aprirsi in automatico una volta che il dispositivo è stato rilevato dal computer (in caso contrario, aprire il programma facendo doppio click sul relativo collegamento); effettuare l'accesso inserendo la password, selezionare "Holter ECG", quindi "Nuova Analisi" ed inserire i dati del paziente.
4. Al termine dell'operazione, scollegare il dispositivo dal computer effettuando la procedura di "Rimozione sicura dell'hardware" concernente i dischi rimovibili.
5. Procedere all'applicazione del dispositivo sul paziente come indicato nella "Guida all'installazione sul paziente".
6. Al termine del monitoraggio, spegnere il dispositivo premendo il pulsante di accensione per circa 5 secondi e scollegare il sensore ed i relativi accessori dal paziente.
7. Collegare il sensore al computer mediante il cavo USB, accedere al programma Holter Manager e procedere all'invio dei dati selezionando "Invia Analisi".